

# VERSAFITCUP® CC

EACH TO THEIR OWN



TÉCNICA QUIRÚRGICA

## UNA SOLUCIÓN PARA CADA CASO

El Versafitcup® CC ofrece distintas soluciones según las necesidades de los pacientes: insertos de borde plano o con ceja antiluxante de polietileno UHMWPE estándar o HIGHCROSS® cross-linked Polyethylene; insertos de cerámica; cotilo «press-fit» con la posibilidad de fijación adicional por medio de tornillos.

El Sistema Versafitcup® se compone del Versafitcup® y del Versafitcup® CC: un concepto único, que ofrece una completa gama de producto para responder a todo tipo de exigencias.

## PREÁMBULO


En este documento se describe la Técnica Quirúrgica del Versafitcup® CC y de la versión Versafitcup® CC Light.

Si desea más información sobre el Versafitcup®, consulte la Técnica Quirúrgica específica.

Lea atentamente las instrucciones de uso y póngase en contacto con Medacta® si tiene cualquier pregunta sobre la compatibilidad del producto.

**ÍNDICE**

<b>1</b>	<b>INDICACIONES ESPECÍFICAS</b>	4
<b>2</b>	<b>PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA</b>	4
<b>3</b>	<b>VIAS DE ABORDAJE</b>	4
<b>4</b>	<b>FRESADO</b>	5
<b>5</b>	<b>PRUEBAS</b>	6
<b>6</b>	<b>IMPACTACIÓN DEL COTILO</b>	7
<b>7</b>	<b>PRUEBAS DE ESTABILIDAD</b>	9
<b>8</b>	<b>POSICIONAMIENTO DEL INSERTO DEFINITIVO</b>	10
	<b>8.1</b> POSICIONAMIENTO DEL INSERTO DE POLIETILENO DEFINITIVO	11
	<b>8.2</b> POSICIONAMIENTO DEL INSERTO DE CERÁMICA DEFINITIVO	12
<b>9</b>	<b>NOMENCLATURA DEL INSTRUMENTAL</b>	14
<b>10</b>	<b>NOMENCLATURA DEL IMPLANTE</b>	18

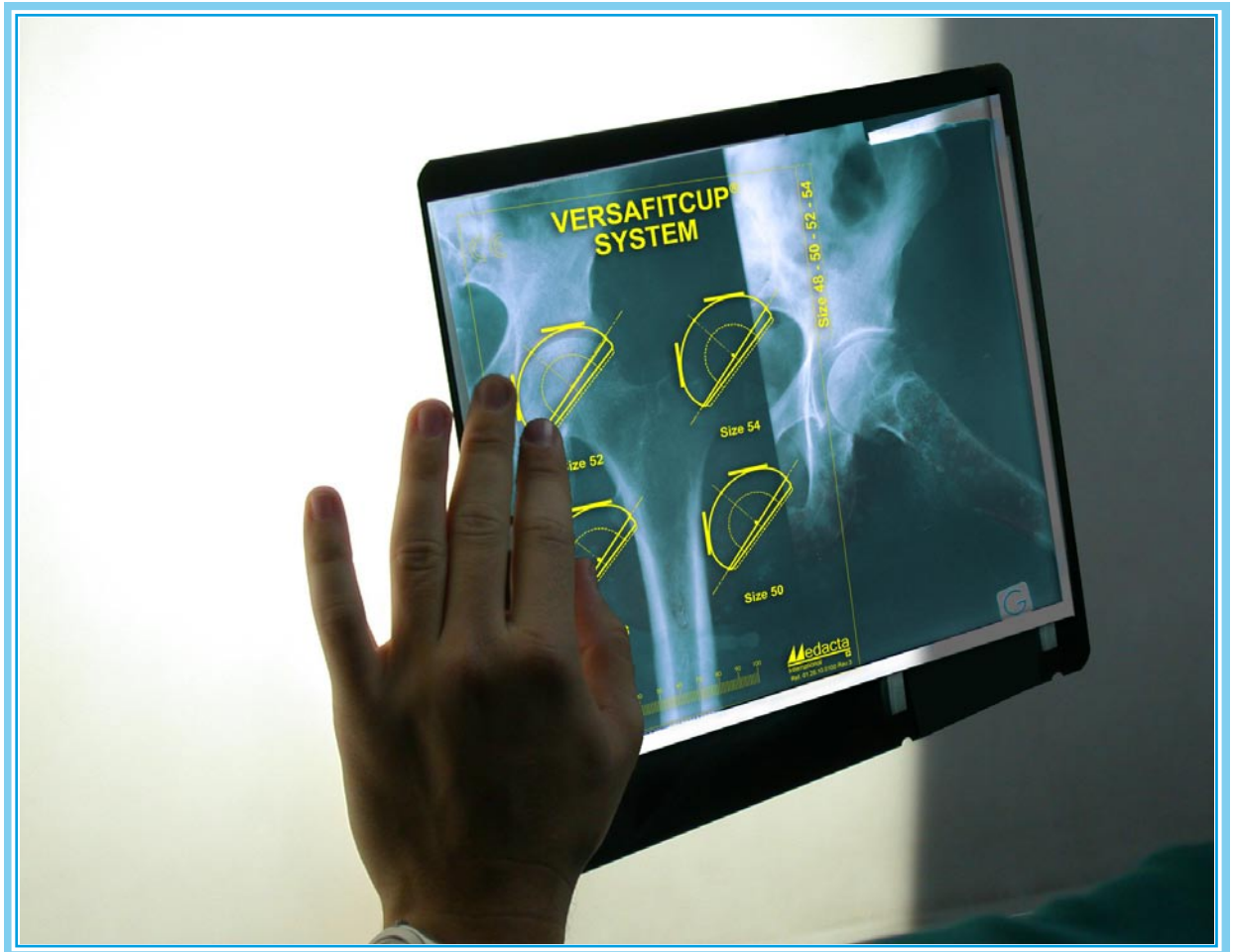

## 1 INDICACIONES ESPECÍFICAS

Además de su indicación estándar para la artroplastia total de cadera, sus indicaciones específicas son:


- ▶ Insertos y cabezas de cerámica-cerámica para pacientes con altos niveles de actividad;
- ▶ Revisiones de cadera sin grandes destrucciones (PAPROSKY tipo II).

## 2 PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

El objetivo es determinar el tamaño óptimo del implante acetabular.

El juego de plantillas radiográficas a escala 1.15:1 (con una radiografía a la misma escala) permite determinar:

- ▶ El tamaño del implante.
- ▶ La posición idónea del implante acetabular para obtener una cobertura óptima.

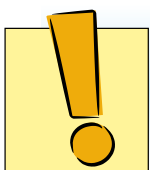


### ADVERTENCIA

El implante definitivo se selecciona intraoperatoriamente, ya que pueden existir discrepancias entre las condiciones reales y las aproximaciones obtenidas con el juego de plantillas. La elección se realiza una vez utilizada la última fresa y después de evaluar la implantación del cotilo de prueba.

## 3 ABORDAJES QUIRÚRGICOS

El cirujano es quien decide el abordaje quirúrgico.

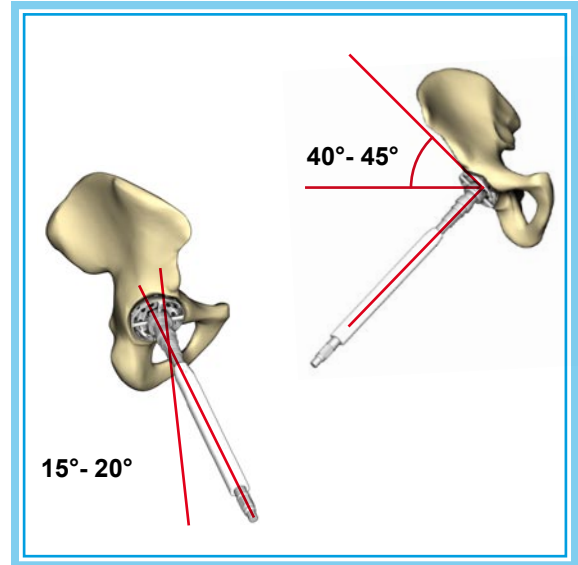


## 4 FRESADO

Una vez realizada la osteotomía del cuello del fémur, esponga y prepare la cavidad acetabular, elimine los osteofitos y reseque el ligamento transverso acetabular.

Inicie el fresado con las fresas acetabulares. El eje de fresado idóneo tiene una inclinación de 40°/45°, y una anteversión de 15°/20°. (Anteversión recomendada para abordajes posteriores).



Para fresar el acetábulo se debe comenzar fresando desde la más pequeña e ir incrementándola de 2 en 2 mm, hasta que se obtenga una cavidad hemisférica perfectamente regular, en presencia de sangrado del hueso subcondral.

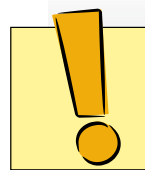

### ADVERTENCIA

Durante el fresado, evite cambiar el eje de la fresa para no provocar una ovalización en la cavidad acetabular, que puede alterar o impedir el asentamiento primario del implante.

Por norma general, el diámetro correcto es 4 ó 6 mm superior al diámetro de la cabeza del fémur. Tenga la precaución de conservar, en lo posible, la mayor cantidad de masa ósea hasta el nivel de las columnas anterior y posterior. Se puede guardar el hueso fresado para llenar los huecos entre el implante y el acetábulo.

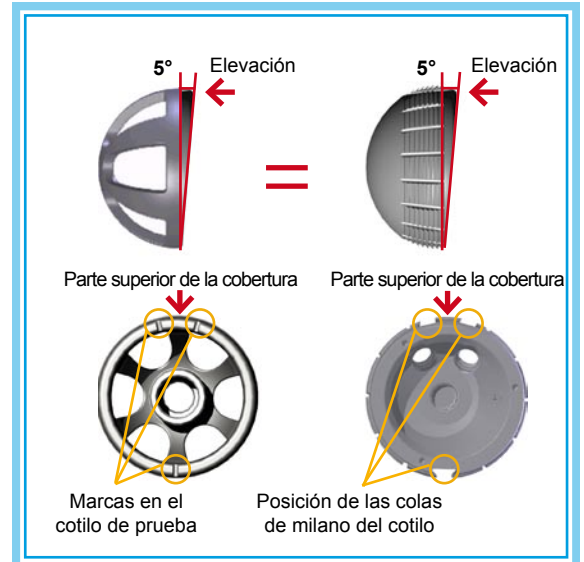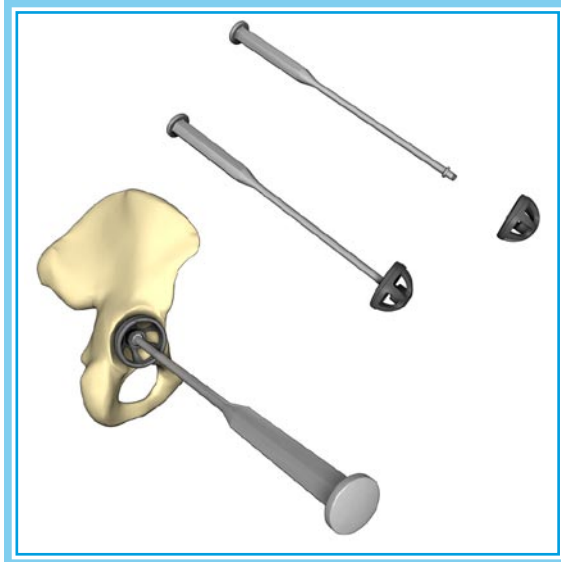

## 5 IMPLANTACIÓN DE PRUEBA

Monte el cotilo de prueba (cuyo diámetro sea el mismo que el diámetro de la última fresa) en el mango multifunción. Introduzca el cotilo de prueba en la cavidad fresada para estimar la profundidad y orientación del componente acetabular.

Cotilos de prueba:

- ▶ Son lisos y sus dimensiones son las mismas que las de las fresas, para evitar dañar el acetábulo.
- ▶ Cuentan con varios orificios que ofrecen visión directa de la superficie acetabular subyacente.

Si bien las fresas y los cotilos de prueba son hemisféricos, los implantes son elípticos con una dilatación ecuatorial, asegurando un buen encaje inicial a presión. Tanto el implante como el cotilo de prueba incorporan una elevación de 5°. Las marcas en el cotilo de prueba corresponden a las colas de milano del cotilo Versafitcup® CC o las marcas láser, que ayudan a identificar la parte superior de la cobertura (véase la imagen).

### OPCIÓN




Para asegurar una posición en profundidad correcta del cotilo definitivo, marque con un bisturí eléctrico la parte superior de la cobertura y el nivel de profundidad del cotilo de prueba. Se dispone de una guía de orientación que resulta útil para el posicionamiento.



### ADVERTENCIA

Si el componente de prueba no es estable o se duda de su estabilidad primaria (especialmente si la calidad ósea es deficiente), es posible optar por un tamaño de cotilo más grande, tanto con fresado como sin fresado acetabular adicional.



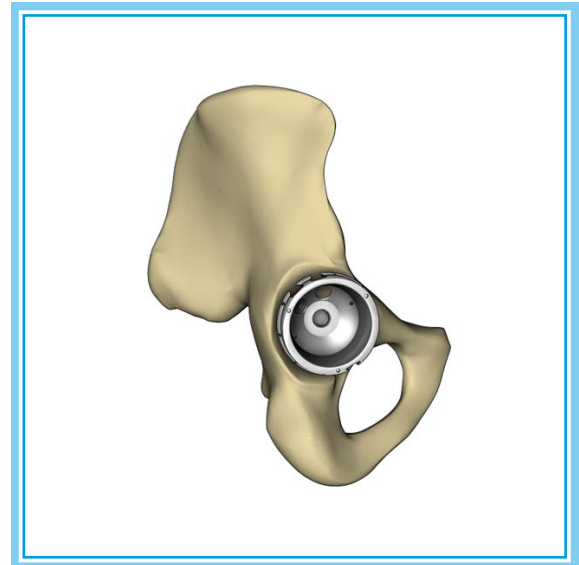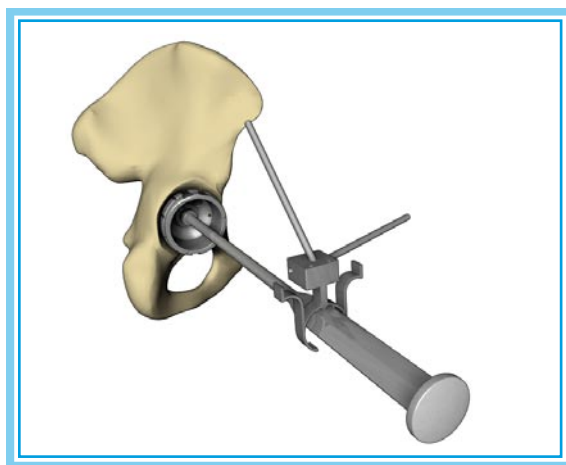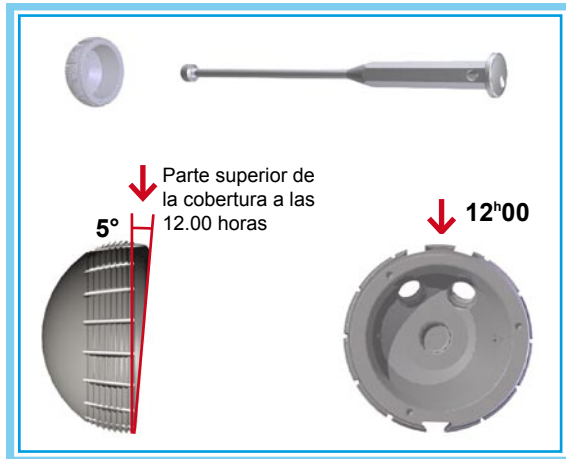


## 6 IMPACTACIÓN DEL COTILO


Una vez la implantación de prueba sea satisfactoria se puede posicionar el cotilo definitivo. El tamaño del cotilo definitivo es el mismo que el tamaño de la última fresa. El cotilo definitivo está sobre dimensionado lo que permite conseguir un mayor press-fit. Atornille el mango impactador al cotilo (ref. 01.26.10.0019) hasta el tope para no dañar la rosca del impactador durante la implantación. Impacte el implante, con el ángulo de orientación deseado, en el acetábulo preparado.

### OPCIÓN

Se dispone de una guía de orientación que le ayuda a posicionar el cotilo para encontrar la orientación satisfactoria evaluada durante la implantación de prueba: la guía de orientación se sitúa sobre la parte superior del mango de impactación. Las dos barras están inclinadas a 45° y 20° respecto al mango.

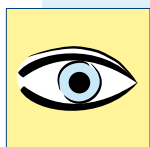

Impacte el cotilo con un martillo hasta que quede completamente estable.

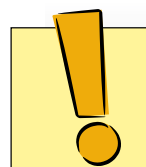


### ADVERTENCIA

Una vez haya impactado el cotilo, asegúrese de que se hayan eliminado los osteofitos para evitar su contacto con la cabeza.

### TRUCO

Para asegurar que la profundización es correcta, utilice las marcas realizadas durante la implantación del cotilo de prueba o utilice los dos agujeros para ver el suelo acetabular (o el agujero central en la versión Versafitcup® CC Light). Debido a la forma elíptica del cotilo es normal que quede un espacio entre éste y el suelo acetabular. La distancia no debe ser de una profundidad superior a 2 mm.



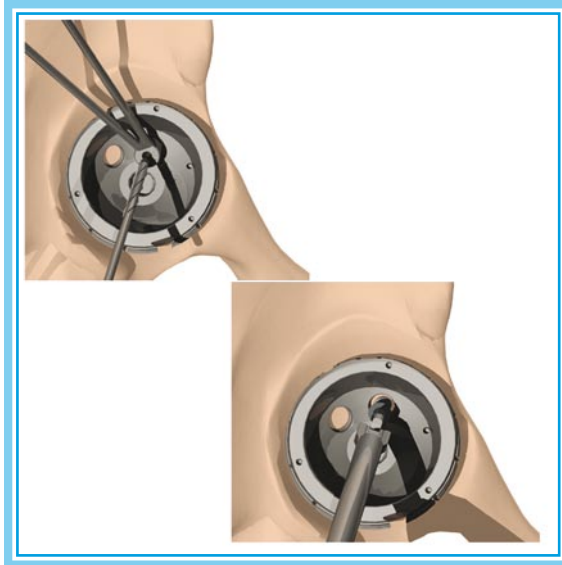

En caso de inestabilidad del cotilo de prueba o que existan dudas en la estabilidad primaria, se pueden añadir tornillos intraacetabulares (salvo en la versión Versafitcup® CC Light).

Taladre a través de los agujeros del cotilo con una broca de 3,2 mm de diámetro con la guía de taladro para dirigir la broca.

Utilice el indicador de profundidad de gancho para medir la profundidad de taladrado y seleccione un tornillo autorroscante de la longitud adecuada (de cabeza plana y 6,5 mm de diámetro).

Utilice un destornillador de cabeza hexagonal cardán para atornillar.


#### ADVERTENCIA

En los insertos de PE se recomienda cerrar los agujeros del cotilo con tapones metálicos. En la versión Versafitcup® CC, el cotilo se envasa por separado de los tapones metálicos (ref. 01.26.55.TP), y en la versión Versafitcup® CC Light los tapones metálicos se envasan juntos.





#### ADVERTENCIA

Utilice siempre tornillos de cabeza plana y compruebe que queden totalmente alojados (asegúrese de que las cabezas no sobresalgan de la superficie interior del cotilo). El ángulo máximo de los tornillos que se permite alrededor del posicionamiento radial es de 10 grados.

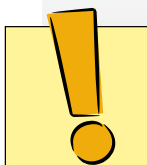



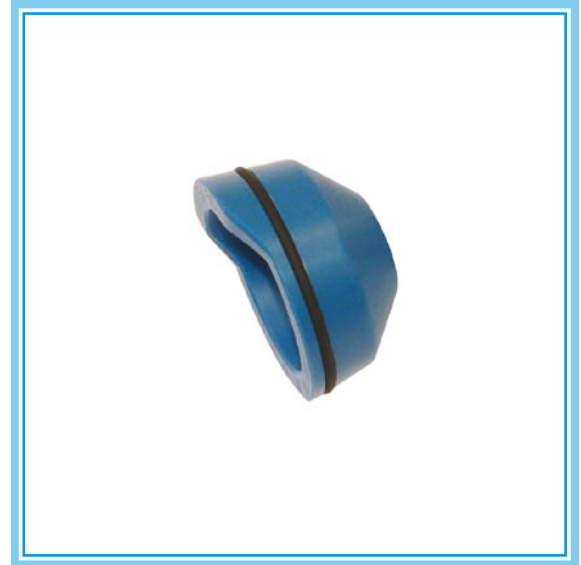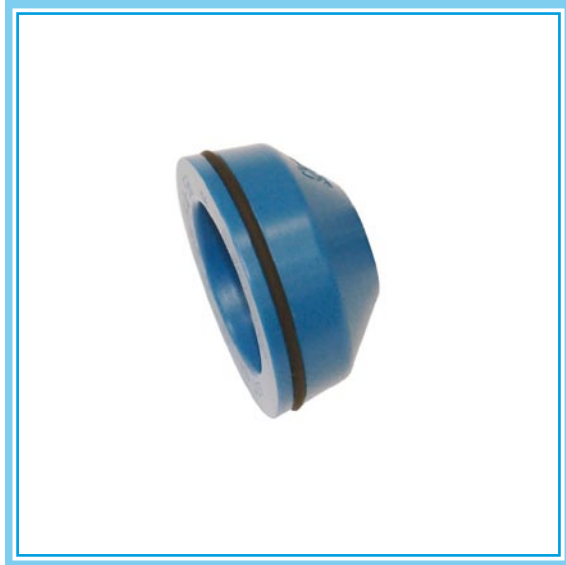

## 7 PRUEBAS DE ESTABILIDAD

Durante las pruebas de estabilidad se puede optar por un inserto de borde plano o un inserto con ceja antiluxante según las preferencias del cirujano (el inserto de cerámica no está disponible con ceja antiluxante).

Limpie la superficie interior del cotilo

Monte el mango multifunción en el inserto de prueba correspondiente al tamaño del cotilo y al diámetro de la cabeza del fémur (los insertos de diámetro interior de 36 mm sólo están disponibles para las versiones de cerámica y HIGHCROSS® de PE de borde plano).


Desatornille el mango multifunción y reduzca la cadera para evaluar la estabilidad articular y la longitud de la extremidad.

Después de comprobar y evaluar la movilidad, la estabilidad articular y la longitud de la extremidad inferior, retire el inserto de prueba con el mango multifunción.




### TRUCO

En el caso del inserto de prueba con ceja antiluxante, marque con un bisturí eléctrico la posición satisfactoria de la parte superior de la cobertura.

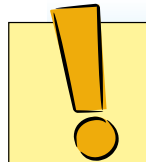

### ADVERTENCIA

Las pruebas de estabilidad se tienen que realizar con cabezas de prueba, no con cabezas definitivas.

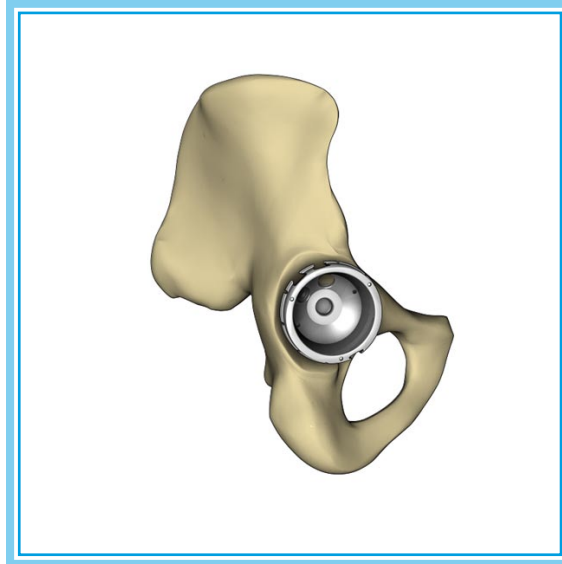

## 8

### POSICIONAMIENTO DEL INSERTO DEFINITIVO

El diámetro externo del inserto es el mismo del diámetro interno del cotilo implantado y el diámetro interno del inserto es el mismo que el de la cabeza elegida.

Antes de introducir el inserto, limpie la superficie interior del cotilo, retire cuidadosamente todo el residuo y tejido óseo para evitar dificultar la fijación mecánica.



### 8.1 POSICIONAMIENTO DEL INSERTO DE POLIETILENO DEFINITIVO

Monte el inserto de PE definitivo en el mango multifunción con la arandela de impactación para el inserto fijo correspondiente al diámetro de la cabeza y tipo de inserto elegidos.

Posicione el conjunto en el cotilo.

Impacte el inserto de PE con un martillo, hasta que quede totalmente fijo.

#### TRUCO



Para evaluar la colocación correcta de los insertos de borde plano y la parte plana del inserto con ceja antiluxante: compruebe que el borde exterior del cotilo esté alineado exactamente con el borde exterior del inserto.

Para orientar la elevación del inserto con ceja antiluxante utilice: las marcas láser del cotilo situadas a las 11.00 y a las 13.00 horas, la marca láser de la arandela de impactación situada a las 12.00 horas y, por último, una marca reali-

zada durante la evaluación con el inserto de prueba con ceja antiluxante.




#### ADVERTENCIA

Antes de que el inserto esté alojado en su totalidad, se recomienda no cambiar su posición en rotación.

Retire el mango multifunción con su arandela de impactación.

Posicione la cabeza definitiva y reduzca la caída.

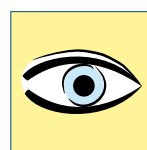

#### OPCIÓN

Para separar la arandela de impactación del mango multifunción se puede utilizar la llave de liberación.



## 8.2 POSICIONAMIENTO DEL INSERTO DE CERÁMICA DEFINITIVO


Coloque manualmente el inserto de cerámica en el eje del cotilo. Existe una ventosa que puede opcionalmente utilizarse para manipular el inserto de cerámica sin tocarlo.

Compruebe que haya posicionado el inserto correctamente.



### TRUCO

Para evaluar la colocación correcta de los insertos de cerámica: compruebe que el borde exterior del cotilo esté alineado exactamente con el borde exterior del inserto.

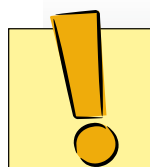

### ADVERTENCIA

No se recomienda implantar un inserto de cerámica si la colocación del cotilo es demasiado vertical (por ejemplo, si la inclinación es superior a 45°).


### ADVERTENCIA



Si el posicionamiento del inserto de cerámica es erróneo, no se recomienda utilizar unas tenazas para retirar el inserto ni impactar el borde del inserto.


Si el inserto está posicionado correctamente, fíjelo en su posición definitiva presionando y empujándolo con el pulgar.

Para realizar una impactación definitiva, monte la esfera de impactación de insertos de cerámica en el mango multifunción.

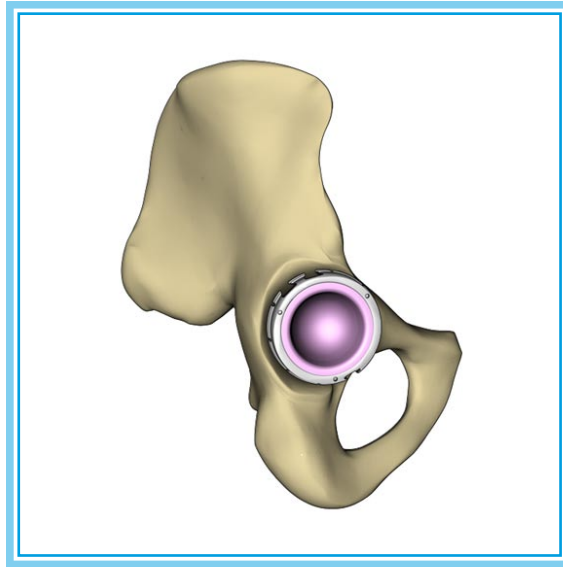


Introduzca la esfera en el inserto y fije el inserto en su posición correcta, dando un golpe de martillo suave en dirección axial.

Posicione la cabeza de cerámica definitiva y reduzca la cadera.

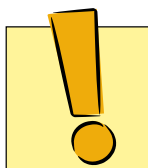

**ADVERTENCIA**

Nunca debe entrar en contacto un martillo metálico con un inserto de cerámica.

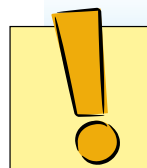

**ADVERTENCIA**


En caso de cerámica-cerámica es obligatorio utilizar cabezas de fémur de una cerámica compatible con la cerámica de los insertos.

# 9 NOMENCLATURA DEL INSTRUMENTAL

## 01.26s.304 INSTRUMENTAL GENERAL (Bandeja n.º 1.1-1.2)


Bandeja N.º **1.1** (del 1 al 13)

**INSTRUMENTAL GENERAL**

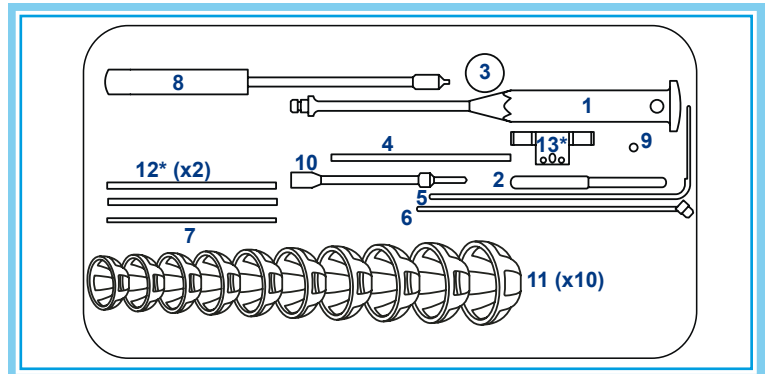

Bandeja N.º **1.2** (del 14 al 15)


**FRESAS**

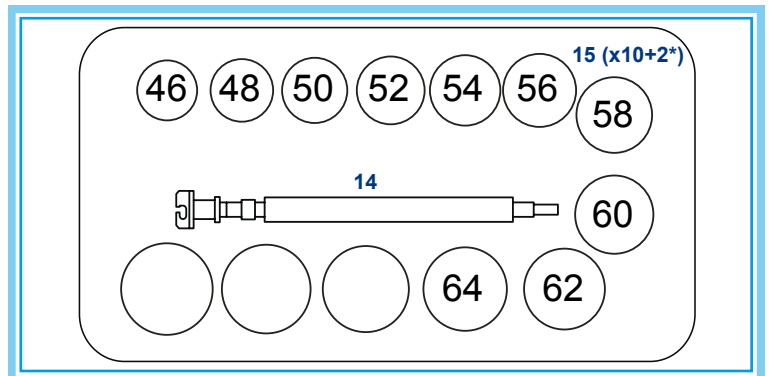

## 01.26s.303 INSTRUMENTAL ESPECÍFICO PARA EL VERSAFITCUP® CC (bandeja n.º 2)

Bandeja N.º **2** (del 16 al 21)

**VERSAFITCUP® CC**

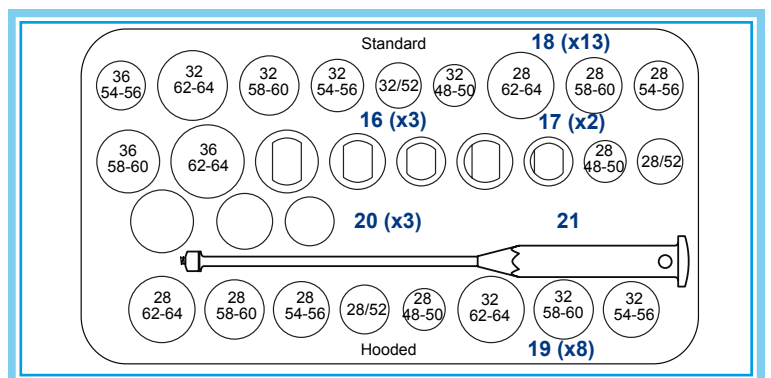

**BANDEJA 1.1**

REF	Descripción		Cantidad	N°
01.26.10.0001* ó 01.26.10.0004	Mango multifunción corto o Mango multifunción largo		1	1
01.26.10.0063	Barra para el mango multifunción		1	2
01.26.10.0075	Impactador de corrección del cotilo		1	3
01.26.10.0150	Llave de liberación de la arandela de impactación		1	4
01.26.10.0068	Indicador de profundidad de gancho		1	5
01.26.10.0078	Guía de broca en ángulo		1	6
01.26.10.0130	Broca de 3,2 mm de diámetro L130		1	7
01.26.10.0011	Destornillador de cabeza hexagonal cardán de 3,5 mm		1	8
01.26.10.0012	Broca de bayoneta de 3,2 mm de diámetro L 56		1	9
01.26.10.0013	Portabroca de bayoneta flexible		1	10
01.26.10.0020 01.26.10.0021 01.26.10.0022 01.26.10.0023 01.26.10.0024 01.26.10.0025 01.26.10.0026 01.26.10.0027 01.26.10.0028 01.26.10.0029	Cotilo de prueba Ø 46 Cotilo de prueba Ø 48 Cotilo de prueba Ø 50 Cotilo de prueba Ø 52 Cotilo de prueba Ø 54 Cotilo de prueba Ø 56 Cotilo de prueba Ø 58 Cotilo de prueba Ø 60 Cotilo de prueba Ø 62 Cotilo de prueba Ø 64		10	11
01.04.10.0012*	Barra para la guía de orientación		2*	12
33.22.0066*	Guía de orientación		1*	13
01.26.10.0059*	Atornillador de cabeza exagonal		1*	

\* bajo petición

**BANDEJA 1.2**

REF	Descripción		Cantidad	N°
01.11.10.0600	Mango para la fresa acetabular		1	14
01.30.10.3142*	Fresa acetabular Ø 42		10+2*	15
01.30.10.3144*	Fresa acetabular Ø 44			
01.30.10.3146	Fresa acetabular Ø 46			
01.30.10.3148	Fresa acetabular Ø 48			
01.30.10.3150	Fresa acetabular Ø 50			
01.30.10.3152	Fresa acetabular Ø 52			
01.30.10.3154	Fresa acetabular Ø 54			
01.30.10.3156	Fresa acetabular Ø 56			
01.30.10.3158	Fresa acetabular Ø 58			
01.30.10.3160	Fresa acetabular Ø 60			
01.30.10.3162	Fresa acetabular Ø 62			
01.30.10.3164	Fresa acetabular Ø 64			

01.26.10.0400	Bandeja vacía			
02.02.10.0412*	Bandeja externa para esterilización			

\* bajo petición



**BANDEJA 2**

REF	Descripción		Cantidad	N°
01.26.10.0090	Arandela de impactación para el inserto de PE de borde plano Ø 28		3	16
01.26.10.0091	Arandela de impactación para el inserto de PE de borde plano Ø 32			
01.26.10.0092	Arandela de impactación para el inserto de PE de borde plano Ø 36			
01.26.10.0093	Arandela de impactación para el inserto de PE con ceja antiluxante Ø 28		2	17
01.26.10.0094	Arandela de impactación para el inserto de PE con ceja antiluxante Ø 32			
01.26.10.0200	inserto de borde plano de prueba Ø 28 / Ø 48-50 (Rojo)		13	18
01.26.10.0211	inserto de borde plano de prueba Ø 32 / Ø 48-50 (Rojo)			
01.26.10.0201	inserto de borde plano de prueba Ø 28 / Ø 52 (Amarillo)			
01.26.10.0210	inserto de borde plano de prueba Ø 32 / Ø 52 (Amarillo)			
01.26.10.0202	inserto de borde plano de prueba Ø 28 / Ø 54-56 (Azul)			
01.26.10.0203	inserto de borde plano de prueba Ø 32 / Ø 54-56 (Azul)			
01.26.10.0212	inserto de borde plano de prueba Ø 36 / Ø 54-56 (Azul)			
01.26.10.0204	inserto de borde plano de prueba Ø 28 / Ø 58-60 (Negro)			
01.26.10.0205	inserto de borde plano de prueba Ø 32 / Ø 58-60 (Negro)			
01.26.10.0206	inserto de borde plano de prueba Ø 36 / Ø 58-60 (Negro)			
01.26.10.0207	inserto de borde plano de prueba Ø 28 / Ø 62-64 (Verde)			
01.26.10.0208	inserto de borde plano de prueba Ø 32 / Ø 62-64 (Verde)			
01.26.10.0209	inserto de borde plano de prueba Ø 36 / Ø 62-64 (Verde)			
01.26.10.0220	inserto de prueba con ceja antiluxante Ø 28 / Ø 48-50 (Rojo)		8	19
01.26.10.0221	inserto de prueba con ceja antiluxante Ø 28 / Ø 52 (Amarillo)			
01.26.10.0222	inserto de prueba con ceja antiluxante Ø 28 / Ø 54-56 (Azul)			
01.26.10.0223	inserto de prueba con ceja antiluxante Ø 32 / Ø 54-56 (Azul)			
01.26.10.0224	inserto de prueba con ceja antiluxante Ø 28 / Ø 58-60 (Negro)			
01.26.10.0225	inserto de prueba con ceja antiluxante Ø 32 / Ø 58-60 (Negro)			
01.26.10.0226	inserto de prueba con ceja antiluxante Ø 28 / Ø 62-64 (Verde)			
01.26.10.0227	inserto de prueba con ceja antiluxante Ø 32 / Ø 62-64 (Verde)			
01.26.10.0095	Esfera de impactación de insertos de cerámica Ø 28		3	20
01.26.10.0098	Esfera de impactación de insertos de cerámica Ø 32			
01.26.10.0099	Esfera de impactación de insertos de cerámica Ø 36			
01.26.10.0019	Mango impactador		1	21
01.26.10.0072*	Ventosa para insertos de cerámica		1*	

01.26.10.0402	Bandeja vacía			
02.02.10.0413*	Bandeja externa para esterilización			

\* bajo petición

# 10 NOMENCLATURA DEL IMPLANTE

## COTILO VERSAFITCUP® CC LIGHT

DIÁMETRO	REFERENCIAS
Ø 46	01.26.46MBTL
Ø 48	01.26.48MBTL
Ø 50	01.26.50MBTL
Ø 52	01.26.52MBTL
Ø 54	01.26.54MBTL
Ø 56	01.26.56MBTL
Ø 58	01.26.58MBTL
Ø 60	01.26.60MBTL
Ø 62	01.26.62MBTL
Ø 64	01.26.64MBTL

## COTILO VERSAFITCUP® CC

DIÁMETRO	REFERENCIAS
Ø 48	01.26.48MBT
Ø 50	01.26.50MBT
Ø 52	01.26.52MBT
Ø 54	01.26.54MBT
Ø 56	01.26.56MBT
Ø 58	01.26.58MBT
Ø 60	01.26.60MBT
Ø 62	01.26.62MBT
Ø 64	01.26.64MBT

## TAPÓN ROSCADO DEL COTILO VERSAFITCUP® CC

DESCRIPCIÓN	REFERENCIAS
Tapón	01.26.55.TP

## TORNILLO DE ESPONJOSA (CABEZA PLANA Ø 6.5mm)

LONGITUD	REFERENCIAS
25 mm	01.26.65.25
30 mm	01.26.65.30
35 mm	01.26.65.35
40 mm	01.26.65.40
45 mm	01.26.65.45

**INSERTO DE CERÁMICA (BIOLOX® FORTE) CeramTec\***

Cabeza	COTILO									
	Ø 46	Ø 48	Ø 50	Ø 52	Ø 54	Ø 56	Ø 58	Ø 60	Ø 62	Ø 64
Ø 28	38.49.7177.755.40			38.49.7177.765.40	38.49.7177.775.40		38.49.7177.785.40		38.49.7177.795.40	
Ø 32		-		38.49.7177.805.40	38.49.7177.815.40		38.49.7177.825.40		38.49.7177.835.40	
Ø 36		-		-	38.49.7187.635.20		38.49.7187.625.20		38.49.7187.615.20	

**INSERTO DE CERÁMICA (BIOLOX® FORTE) MectaCer**

Cabeza	COTILO									
	Ø 46	Ø 48	Ø 50	Ø 52	Ø 54	Ø 56	Ø 58	Ø 60	Ø 62	Ø 64
Ø 28	38.39.7177.755.20			38.39.7177.765.23	38.39.7177.775.27		38.39.7177.785.20		38.39.7177.795.24	
Ø 32		-		38.39.7177.805.26	38.39.7177.815.20		38.39.7177.825.23		38.39.7177.835.27	
Ø 36		-		-	38.39.7187.635.20		38.39.7187.625.20		38.39.7187.615.20	

**INSERTO DE CERÁMICA (BIOLOX® DELTA)**

Cabeza	COTILO									
	Ø 46	Ø 48	Ø 50	Ø 52	Ø 54	Ø 56	Ø 58	Ø 60	Ø 62	Ø 64
Ø 32	38.49.7187.675.20			38.49.7187.725.00	38.49.7187.735.00		38.49.7187.745.00		38.49.7187.755.00	
Ø 36		-		-	38.49.7187.645.20		38.49.7188.265.00		38.49.7188.275.00	

**INSERTO DE PE DE BORDE PLANO**

Cabeza	COTILO									
	Ø 46	Ø 48	Ø 50	Ø 52	Ø 54	Ø 56	Ø 58	Ø 60	Ø 62	Ø 64
Ø 28	01.26.2839STT			01.26.2841STT	01.26.2844STT		01.26.2848STT		01.26.2852STT	
Ø 32		-		-	01.26.3244STT		01.26.3248STT		01.26.3252STT	

**INSERTO DE PE CON CEJA ANTILUXANTE**

Cabeza	COTILO									
	Ø 46	Ø 48	Ø 50	Ø 52	Ø 54	Ø 56	Ø 58	Ø 60	Ø 62	Ø 64
Ø 28	01.26.2839AT			01.26.2841AT	01.26.2844AT		01.26.2848AT		01.26.2852AT	
Ø 32		-		-	01.26.3244AT		01.26.3248AT		01.26.3252AT	

**INSERTO HC DE PE DE BORDE PLANO (HIGHCROSS®)**


Cabeza	COTILO									
	Ø 46	Ø 48	Ø 50	Ø 52	Ø 54	Ø 56	Ø 58	Ø 60	Ø 62	Ø 64
Ø 28	01.26.2839HCT			01.26.2841HCT	01.26.2844HCT		01.26.2848HCT		01.26.2852HCT	
Ø 32		-		-	01.26.3244HCT		01.26.3248HCT		01.26.3252HCT	
Ø 36		-		-	-		01.26.3648HCT		01.26.3652HCT	


**INSERTO HC DE PE CON CEJA ANTILUXANTE (HIGHCROSS®)**

Cabeza	COTILO									
	Ø 46	Ø 48	Ø 50	Ø 52	Ø 54	Ø 56	Ø 58	Ø 60	Ø 62	Ø 64
Ø 28	01.26.2839HCAT			01.26.2841HCAT	01.26.2844HCAT		01.26.2848HCAT		01.26.2852HCAT	
Ø 32		-		-	01.26.3244HCAT		01.26.3248HCAT		01.26.3252HCAT	

\* bajo petición

**Nota para la esterilización:** La instrumentación no está estéril en el momento de servirla. Debe ser limpiada y esterilizada en autoclave respetando las leyes de los países de la UE, las directivas de cada lugar y siguiendo las instrucciones de uso del fabricante del autoclave.

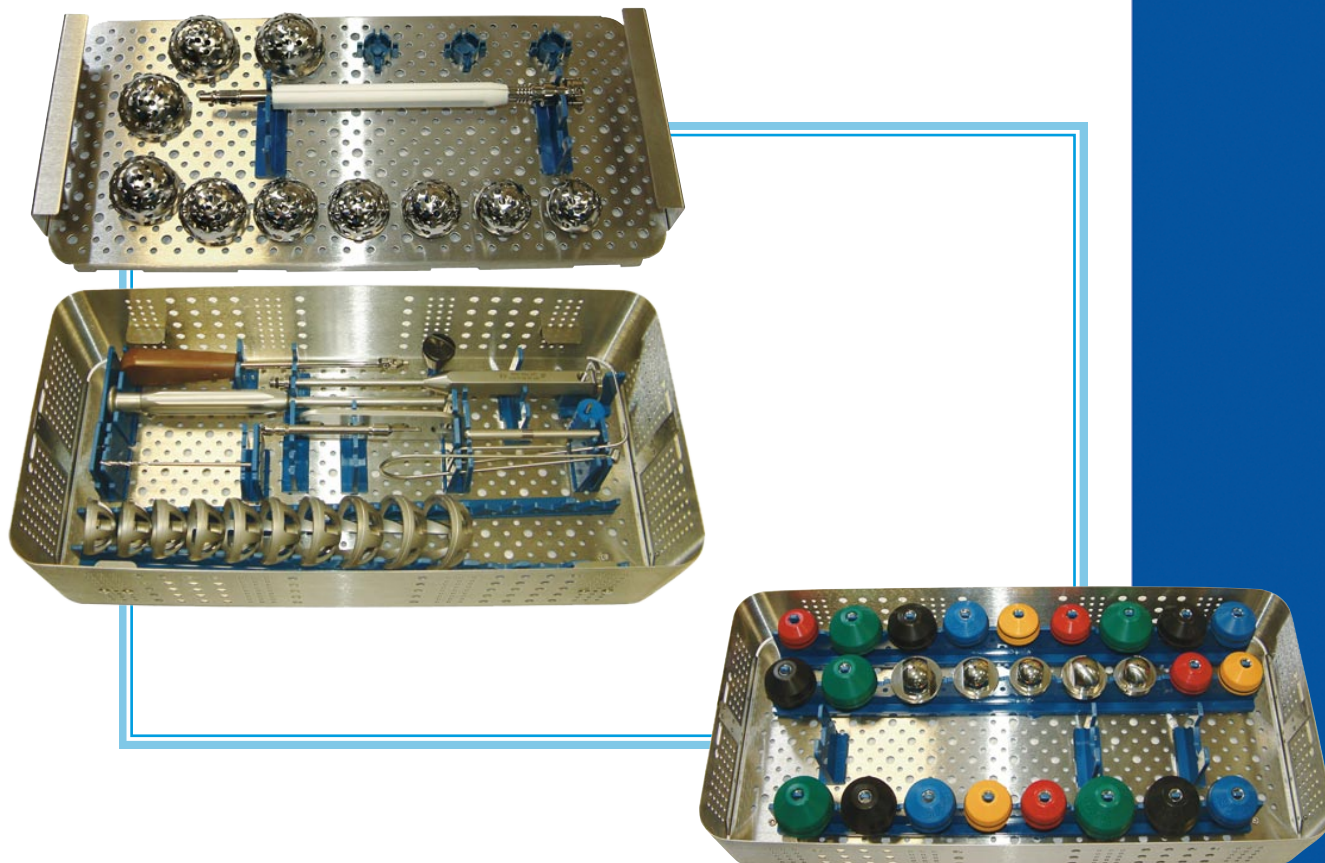

<b>Medacta International SA</b>	Strada Regina - 6874 Castel San Pietro - Switzerland Phone +41 91 696 60 60 - Fax +41 91 696 60 66 info@medacta.ch
<b>Australia</b>	<b>Medacta Australia PTY.LTD</b> Unit 9 - 9/11 Chaplin Drive - Lane Cove 2066 - N.S.W. - Australia Phone +61 (2) 94202944 - Fax +61 (2) 94202578 info@medacta.com.au
<b>Belgium</b>	<b>Medacta Belgium B.V.B.A./S.P.R.L.</b> 5 Rue de la Maitrise - 1400 Nivelles - Belgium Phone +32 67 555 482 - Fax +32 67 555 483 info@medacta.be
<b>France</b>	<b>Medacta France SA</b> 5 Allée des Bas Tilliers ZAC des Barbanniers - 92230 Genevilliers - France Phone +33 147 39 07 22 - Fax +33 147 39 73 17 info@medacta.fr
<b>Germany</b>	<b>Medacta Ortho GmbH</b> Jahnstrasse 86 - D - 73037 Göppingen - Deutschland Phone +49 (0) 7161 504430 - Fax +49 (0) 7161 50 44 3 - 20 info@medacta.com
<b>Italy</b>	<b>Medacta Italia Srl</b> Via G. Stephenson, 94 - 20157 Milano - Italia Phone +39 02 390 181 - Fax +39 02 390 183 24 info@medacta.it
<b>Portugal</b>	<b>Medacta Portugal SA</b> Rua João de Deus 4 B - 2665-235 Malveira - Portugal Phone +351 21966 7590 - Fax +351 21 966 7591 medacta@shortes-portugal.com
<b>Switzerland</b>	<b>Medacta Swiss</b> CH - 2802 Develier, Sous les Pins 7 CH - 8500 Frauenfeld, Thundorferstrasse 3 Phone +41 (0) 848 423 423 - Fax +41 (0) 848 423 424 info@medacta-swiss.ch
<b>UK</b>	<b>Medacta UK Limited</b> 9 Cartwright Court - Cartwright Way - Forest Business Park - Bardonia Hill - Leicestershire - LE67 1UE - UK Phone +44 (0) 1530 830451 - Fax +44 (0) 1530 839326 info@medacta.co.uk
<b>USA</b>	<b>Medacta USA</b> 4725 Calle Quetzal Suite B - Camarillo - California 93012 - USA Phone +1 805 437 7085 - Fax +1 805 437 7089 info@medacta.us.com
<b>Argentina, Austria, Bosnia, Brazil, Croatia, Egypt, Greece, Montenegro, Netherlands, Serbia, South Africa, Spain, Turkey.</b>	

[www.medacta.com](http://www.medacta.com)

Versafitcup CC Técnica Quirúrgica  
ref. 99.16CC.32  
rev. 00

CE 0546

